

健康機器・熱中症対策・暖房機器

□ 熱中症指標計 □

— — —		京都電子工業
型 式		WBGT-113
測定範囲	WBGT 値 ※ 1	0～50℃
	気 温	0～50℃
	相 対 湿 度	10～90%RH
	輻 射 温 度	0～80℃
測定精度	WBGT 値 ※ 1	±2℃(15～35℃)
	気 温	±1℃(15～40℃)
	相 対 湿 度	±5%(20～80%)
	輻 射 温 度	±2℃(15～50℃)
電 池 寿 命		最大連続使用時間 約70時間
電 源		単4形1.5V乾電池×2本
寸 法 (L × W)		240×40 mm
質 量		約 150 g
YDEC 商 品 番 号		282826
YDEC 管 理 記 号		NCS-

片手で熱中症の
危険度が素早く
簡単に計測できます



WBGT熱ストレス指数の基準値表 (各条件に対応した基準値)

WBGT基準値 ℃		WBGT基準値 ℃		例
区分	熱に順化している人	熱に順化していない人		
0 安静	33	32	安静	
1 低代謝率	30	29	楽な座位での軽い手作業や手及び腕の作業、腕と脚の作業など	
2 中程度代謝率	28	26	継続した頭と腕の作業や腕と脚の作業、腕と胴体の作業など	
3 高代謝率	気流を感じるとき		強度の負荷がかかる腕と胴体の作業など	
	26	23		
	気流を感じないとき			
	25	22		
4 極高代謝率	気流を感じるとき		最大限の速さでとても激しい活動など	
	25	20		
	気流を感じないとき			
	23	18		

※熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にはく露されていなかった人」をいいます。

※1: WBGTとは、温度・湿度・熱のふく射を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格基準です。

□ 自動体外式除細動器(AED) □

メーカー	フィリップスエレクトロニクスジャパン	オムロン
型式	ハートスタートHS1 M5066A	レスキューハート HDF-3500
製品構成	HS1本体、ユーザーズガイド、HS1バッテリー、成人用パッドカートリッジ(2個)、AED救急セット、クイックリファレンスガイド、標準キャリングケース	除細動パッドバック(除細動パッド+バッテリー一体型)、AEDキャリングケース・簡易マニュアル、AED消耗品交換時期表示ラベル
波形	二相性切頭指数波 (波形パラメータは患者胸郭インピーダンスに応じて自動的に調整。)	二相性波形 SCOPE™バイフェジック技術、エスカレーション電気ショック
エネルギー	定格150J	単回使用の使い捨てバッテリー(除細動パッド一体型)
寸法 (本体)	70×210×190mm (H×W×D)	縦200×幅180×高さ50 mm
寸法 (ケース)	240×210×120mm (W×H×D)	
質量	バッテリー・パッドカートリッジ装着時の本体: 1.5kg	約1.1kg(除細動パッドバックを含む)
YDEC 商品番号	282831	282831
YDEC 管理記号	AED-	AED-



レスキューハート HDF-3500

操作手順



←AED本体

1 カバーを開ける
ハンドルを引くと電源が入り音声ガイダンスがスタートします

2 パッドを貼る
音声に従って電極パッドを貼り、自動解析を待ちます

3 ボタンを押す
音声に従ってボタンを押します (不要な場合は通電しません)

わかりやすい音声メッセージによって、突然の心停止が発生した方を迅速に処置することが出来ます。
心肺蘇生法の手順をガイドする「CPRコーチング」機能も備えています。



ハートスタートHS1 M5066A

メンテナンス

毎日の自動セルフテストにより、使用可能な状態をキープ。使用できる状態であることを緑ランプの点滅で通知します。
(注意: バッテリー及び消耗品には使用期限がありますので、未使用でも定期的に交換が必要です。)